



## K312/DS-039/2 - B 120 X H 75 CM C-BOGEN KOMPATIBEL

Dieser untere Körperschild reduziert die Exposition gegenüber Streustrahlung vom Tisch oder vom Körper des Patienten.

Bestehend aus einer leichten und dauerhaften Struktur mit einer zentralen Verbindung und einem Schwenkarm, der einen flexiblen Bleivorhang trägt. Optionale halbflexible Oberkörperschilde bieten zusätzlichen Schutz des Oberkörpers.

[En savoir plus](#)



## DESCRIPTION DU PRODUIT

- Der Schild lässt sich leicht an beiden Seiten des Tisches anbringen, so dass der Schwenkarm immer zum Kopfende zeigt.
- Ein 55 cm breiter Befestigungsbügel wird auf eine 25 mm hohe Tisch-Zubehörschiene (max. 11 mm dick) geschoben.
- Die Position des Sicherungsgriffs ermöglicht es, dass er über das Schienenende hinausragt und weiter entlang des Tisches neu positioniert werden kann.
- An der großen integrierten Schiene können Gerätesteuerungen montiert werden.
- Die Abschirmung verwendet eine einzigartige kollisionstolerante Verbindung, die eine Aufwärtsbewegung des Schwenkarms im Falle eines Aufpralls von unten (z.B. Kollision mit einem beweglichen C-Bogen) ermöglicht. Der daran befestigte Vorhang bewegt sich im Gleichschritt, wobei die winklige Profilüberlappung die Kontinuität des Schutzes gewährleistet.
- Der Schwerlastmittelenker verfügt über eine automatische Verschleißnachstellvorrichtung, die eine präzise Gelenkreibung gewährleistet und unerwünschte Bewegungen des Vorhangs selbst dann verhindert, wenn der Tisch in eine beliebige Richtung geneigt wird.
- Die flexible Innenschicht des Vorhangs ist mit seiner Außenhülle verklebt, was zu einem extrem starken, geschmeidigen und leicht zu reinigenden Vorhang führt. Da die Schutzschicht nicht separat in einer Hülle (Tasche) aufgehängt ist, kann sie innen nicht unbemerkt reißen oder abfallen.

